

Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	X007 / GCPC KN95
Productnaam	Anti Bacterial Mask KN95
Leverancier	GCPC
Type mondkmasker	KN95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM	+			5.1.2e
Oordeel AH/TOXI	+			

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	P2	5.1.2e

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	> 34.	Ja	5.1.2e

Onze beoordeling type mondkmasker
Goedkeuren FFP2

Ready to GO (JA/NEEN)
Ja

DEXTRA

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	X007 / GCPC KN95
Leverancier	GCPC		
Productnaam	301320 Anti-Bacterial Mask KN95		
Datum	30/3/20		
Naam	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e		
Functie	<input type="checkbox"/> Toxio <input type="checkbox"/> ...		
Besproken met RIVM	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Documentatie niet beschikbaar bij beoordeling	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygenisten	<i>In principe goed. laat lucht door bij neus. FFP2 erop plakt op masker; verdund niet</i>
---------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>20</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Anti-Bacterial Mask KN95</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>G-CPL</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>Chinese Export</i>
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>Op masker is info present</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>6 CPC EN149:2001+A1:2009 GB 2626-2006 CE FFP2 KN95 lot no 20624</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>wit buiten met 4 blowlagen wit binnen</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Fittest (norm = 100)

Datum:

30/03

Inkoopnummer	X007
Lotnummer	
Productnaam	
Leverancier	GCP
Type mondmasker	KNG5

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Voelt 'stugger' dan andere maskers
 schuift met up and down

2 clip FW
 34
 + clip FW
 58

zit met clip en strak

Bril bestaat bij mij alleen ook met clip
 en zamen afit-ie redelijk

resultaat



clip -

+

34

58

77

127

Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 30 mrt. 2020

Inkoopnummer	-
Lotnummer	X007
Productnaam	Anti-Bacterial mask KN95
Leverancier	GCPC
Type mondkap	KN95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	94,6%	Pass for P2
Masker 2	96,5%	Pass for P2
Masker 3	96,7%	Pass for P2
Totaal gemiddelde	96,0%	Pass for P2

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet aan de eisen van klasse P2.