

BIJLAGE 14

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	18-05-2020
Lotnummer	957
Leverancier	MJH International
Productnaam of naam fabrikant	CH 9200-0010-1010
Productiedatum	18 mei 2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	91 %	P1
0,5	96 %	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	nvt	200+
Testpersoon 2	<10	140
Testpersoon 3	<10	200+
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: Er zitten maskers tussen met maar 3 laagjes. Overige 4 laagjes lijken goed. Fittest waard met clip een hoge score			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: VARIABLE KWALITEIT		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7	X	Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* Ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Particle Penetration by Kalibra

Datum	19 mei 2020
Inkoopnummer	302415
LOT/X-nummer	957

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	78%	Fail P1	90%	Pass P1
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	96%	Pass P2	99%	Pass P3
Totaal gemiddelde	91%	Pass P1	96%	Pass P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	47 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	174 Pa		Pass
Masker 3	100 Pa		Pass

Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan P1
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan P2

5.1.2e


Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

5.1.2e

Fittest by RIVM

Datum	19/5
LOT/X-nummer	957

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. Pa <i>doos 2</i>		nvt		200+
2. 5.1.2e	Te ruim, glijdt van gezicht & valt run	110		140
3. 5.1.2e		110		200+
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				Nee
				Is één clip voldoende?
				Ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
 <p><i>Zit ok met clip wel na 10 min al vrijbare adem weerstand</i></p>				

Type FFP Masker	#FP2- 6h par
Fit test (FAIL of PASS)	5.1.2e

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. De rapportage is niet bedoeld om aansprakelijkheid te verschuiven van de producenten van de producten. Het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage worden niet verspreid of openbaar gemaakt. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	302415	LOT-nummer	957
Datum uitvoering check	19-05-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	MATE (M) International		
Productnaam of naam fabrikant	CH2020-0010-7601 - HT9510		
Productiedatum	09-05-2020		
Naam	[Redacted]		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	PPE test beent masken met maar 3 laagjes (1 melt blown): 78% Fit test met inzet vilt clip is wel goed 3 x 3 scoren > 100. Neutrium wel geschikt voor in masken
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>masker niet storings</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>geopen of</i> <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>HT 9570 - Disposable particle filtering half mask.</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>HUATE - Geringzhou</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input checked="" type="checkbox"/> Anders: <i>1809001:2015</i> <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 years</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>50 stuks in transparante zak in doos</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>NA</i>

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>- masken met buikband: 3 of 4 lappen - neusleem scheef in maskers steek + comfit komt,</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>voem bij bereikte elastisch rond anders?</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>FIHATE GB2626-2006 KN95 HT9570</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>masker deel 1 masker 2+3</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 mb <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <i>1 mb mb mb</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>nacht beeftje</i>
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

2de fit test

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	<p>Hoe past het masker op het gezicht?</p> <p><input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/></p>
2	<p>Waar ontsnapt lucht bij de leaktest</p> <p><input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)</p>
3	<p>Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.</p>
4	<p>Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?</p> <p><input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/></p>

Bijzonderheden:

*Med inzet 1/2 elop is de fit erg goed.
 3 1/2 3 S100. Zelfs 2x 200+*

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 18-5-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 957

Aantal pallets 25Totaal stuks 499.000Aantal samples 150Totaal aantal na samples 498.850Aantal per pallet 20.000Aantal per doos 1000Aantal per verpakkingseenheid 50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 974Inkooporder nummer 302415

LCH-nummer

LCH 2020-0010-10607

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Samples zijn uit 1 beschadigde doos gepakt.

Locatie:

21-114-34/m21-162-3

ingeboekt door:

VRACHTNOTA (B1) / BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor afzender)
 uitsluitend voor ongeregeld vervoer - ministeriële regeling 27-12-04/HDJZ/S&W2004-2842

LOGISTICS BV
 AIRBORNE AVENUE 65
 2133 LV HOOFDDORP
 Tel. 020 6550010

71500215/00

bevr. code	
	FRANCO
netto vracht	
totaal	
omz. bel.	
vracht incl. o.b.	

het vervoer geschiedt op de door s/vs / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr. rechtbank te amsterdam en rotterdam gedeponeerde algemeen vervoercondities 2002, laatste versie.

aan CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ
 LAANAKKERWEG 14
 4131 PB VIANEN

afleveren aan CENTRAAL BOEKHUIS/MEDIQ
 LAANAKKERWEG 14
 4131 PB VIANEN

comp.nr afz.	code verv.	frankeringsvoorschrift	per	plaats van afzending	datum
		ONFRANCO		CTX LOGISTICS BV	(RTO15/05/2020)



AWB : 784-43142153
 HAWB: ACA120101752

ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht, merknamen

499 CTNS

3,357.0 Kg 36,000 M3

Afmetingen (in cm) : Lengte x Breedte x Hoogte
 0 : 0 0 0

AANLEVEREN OP 18/05/2020 TUSSEN 11:00 EN 11:01 UUR.

Opmerkingen : LCH2020-0010-10

OP EUROPALLETS MAX 1.90 / INCL PALLET

GELADEN OP 25. EUROPALLETS

25. EUROPALLETS GERUILD

Totaal : 499 Colli

3.357,0 Kg 36,000 M3

niet voor rembourszendingen in de vracht is verzekering niet begrepen
OVAL

handtekening en datumstempel vervoerder voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

Centraal Boekhuis BV

5.1.2e

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@icloud.com>
Sent: maandag 18 mei 2020 14:38
To: [redacted] <[redacted]@slimstock.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@chulpmiddelen.nl>
Subject: Re: LCH2020-0010-10L01 geen 2R maskers maar FFP2

FFP2 is juist [redacted]

Een hartelijke groet van [redacted]

[redacted]
[redacted]
Distributie

M. 06 [redacted]
E: [redacted] <[redacted]@icloud.com>
E: [redacted] <[redacted]@chulpmiddelen.nl>

Op 18 mei 2020, om 14:33 heeft [redacted] <[redacted]@slimstock.com> het volgende geschreven:

Hoi [redacted]

Ik heb hier een zending FFP2 maskers staan echter zegt de "voorkant" van de distributieApp dat het 2R maskers zijn (is dat verkeerd)?
Het gaat om LCH2020-0010-10L01

<image001.png>

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]

<image002.jpg>
<image003.png> <image004.png> <image005.png> <image006.png>

www.slimstock.com | T. +31(0)570 63 84 00 | [Add me on LinkedIn](#)

Do you want to receive relevant insights? [Subscribe to our newsletter](#)

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). It is not permitted to further distribute, copy or disclose this information to third parties. Slimstock accepts no liability on the basis of the information sent in this e-mail. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract. To all requests, offers, orders and agreements to which Slimstock goods and / or provides services, our terms and conditions apply. These are available on www.slimstock.com/general-conditions.

BIJLAGE 15



www.v-trust.com

V-Trust Inspection Service Co., Ltd.

11/F West Tower, Poly World Trade Centre, 1000 Xingang Road E., Guangzhou, China 510335

Tel: [REDACTED] 5.1.2e Fax: [REDACTED] 5.1.2e E-mail: [REDACTED]@v-trust.com

Declaration

The samples which have been randomly selected from the BULK batch/shipment of 1.2000.000 pcs, which have been inspected under instruction of MJH International BV and shipped to The Netherlands, are delivered to Pony testing laboratories in Shanghai. The test results belong to this.

Mentioned bulk shipment, as well as referring to the V-Trust inspection with reference no Q51594EY.

This test result re-confirms that the randomly selected and tested samples from the bulk shipment meet the requirement of breathing resistance of official China GB2626 standards.



V-Trust Inspection Service

Postbus 15755
1001 NG Amsterdam

PostNL
Afz. 1017 RZ 85-87



€ 8,95

NEDERLAND
01.07.20
NetSet FM 22026

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directoraat-Generaal Curatieve Zorg
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

VOLKSGEZONDHEID
WELZIJN EN SPORT
03 JULI 2020
SCANPLAZA

Frankiemachine & (Digitale) Postzegel

R NL



Aangetekend

Brief: D-A-1
Pakket: B-P-3



3SRRT9138516

BEER ADVOCATEN

Weteringschans 85-87
1017 RZ Amsterdam
Postbus 15755 (1001 NG)