

Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum: 31-03

Inkoopnummer	
Lotnummer	71
Leverancier	Halma
Productnaam	Tongjian
Productiedatum	2
Type mondmasker	KP95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM				
Oordeel AH/TOXI				

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	50,3	

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	62	JA	

Onze beoordeling type mondmasker	
Artikelnummer VWS	958
<p>Afkeur penetratie onvoldoende fittest</p>	

Ready to GO (JA/NEEN)
NEEN. afkeur

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	71
Leverancier	Helma		
Productnaam	Disposable mask KN95		
Datum	31-3-2020		
Naam	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> ...		
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> ...		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Zit niet lekker

Oordeel arbeidshygiënist	vlakke fit / penetratie onvoldoende lekkend / fit onvoldoende test
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Disposable mask KN95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Tongjian
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>Geen opdruk</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker:
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>9 (!)</i> <i>waarvan 2x elektrolyt.</i> <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 9
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input checked="" type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input checked="" type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	71
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

	Score	
	Zonder clip:	Met clip:
Gebruiker: 5.1.2e	12	81
	2.2	4.2

Opmerkingen tijdens gebruik:

Algemeen: (ruim, krap, etc)	<i>ziet met ledes</i>
Verschuift bij Up & Down / Bending?	<i>ja</i>
Is één clip voldoende?	
Meer:	<i>pijnlofacter dan zonder clip na maling</i>

Particle Penetration > 0,3 Micron

Datum: 31/03/2020

Inkoopnummer	39000
Lotnummer	71
Productnaam	
Leverancier	
Type mondk masker	KN 95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	56,5 %	fail for P1
Masker 2	60,6 %	fail for P1
Masker 3	57,8 %	fail for P1
Totaal gemiddelde	58,3 %	fail for P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldet niet aan P1

5.1.2e

R36

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 30-3-20
 Artikelnummer: _____ Lotnummer 71
 Inkooporder nummer _____
 Aantal inkooporder/pakbon _____

Aantal pallets	<u>4</u>
Totaal stuks	<u>39000</u>

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon JA / NEE

Zo niet Telling bevestigd door Naam: 5.1.2e
 Paraaf: 5.1.2e

Aantal afgehaald voor controle	<u>50</u>
Verpakt per	<u>50</u>

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE

Bijzonderheden:

1000 per doos
Verpakt per 50
3x 10.000
1x 9.000

2

Exemplaire pour destinataire
Exemplar voor geadresseerde
Exemplar für Empfänger

LETTRÉ DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT



Code transporteur
Vervoerderscode
Code Frachtführer

No
Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
MOL Logistics (Netherlands) B.V.
Care of: Halma Solutions BV
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.



NL

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door s/va / Stichting Vervoeradres gedeponneerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)

5.1.2h

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

NL

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

THE NETHERLANDS 30/03/20

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
Beigefügte Dokumente

AWB

Dossier: 430/319225
Ref: DISPOSABLE FACE MASK

6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal coli Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes	10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer	11 Poids unit. kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Contage m3 / Volume in m3 Umfang in m3
784-13330310 TCG2003708AE	39	CTNS	disposable mask		405,600	8,21

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
Anweisungen des Absenders

The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen

In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.:
MOL Logistics Netherlands
+31 5.1.2e

20 A payer par / Te betalen door / Zu zahlen vom:	Expéditeur / Afzender Absender	Monnaie / Gelddoort Währung	Destinataire / Geadresseerde Empfänger
Pha de transport / Vrachtprijs Fracht: Reductions / Kortingen Ermäßigungen: Sole / Saio Zwischensumme: Suppléments / Supplementen Zuschläge: Frais accessoires / Bijkomsten de kosten / Nebengebühren: + TOTAL / TOTAL GESAMTSUMME:			

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
Frachtzahlungsanweisungen

Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

15 Remboursement / Rückerstattung

21 Etablie à / Opgemaakt te
Ausgefertigt in

Luchthaven Schiphol 30/03/20

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen

22

5.1.2e

Care of: Halma Solutions B.V.
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

23

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender

Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

Model IRU / Auteursrecht s/va / Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

5.1.2e

1-15 y compris et / inbegrepen 19+21 +22

1-15 einschließl.

Uitgave Beurtvaartadres

Art. 3004

versie 3.2

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

LA 4Z
NK