

## Eindbeoordelingsformulier – Overige hulpmiddelen

Datum	1-4-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	113
Leverancier	Enclomed
Productnaam of naam fabrikant	isolatiesjes
Productiedatum	
Soort hulpmiddel	isolatiesjes
Klasse (indien van toepassing)	

	+	+/-	-	Voornaam beoordelaar
Oordeel RIVM				
Oordeel testpersoon		+X		5.1.2e
Algemene bevindingen:	dunne jas			
Test	Testgemiddelde			Voornaam beoordelaar
Waterkolomtest	≤ 5 cm			
Spattest				
Test bevindingen:	Voldoet niet aan de norm van minimaal 20 cm (EN 13795)			

Versturen?	JA / NEEN	Te dun; voldoet niet aan norm
Artikelnummer VWS		
Algemene bevindingen		

## Checklist prestatiecontrole protectieschorten

Inkoopnummer		Lotnummer	113
Leverancier	Emdamed		
Productnaam	Isolatiejas non-woven		
Datum	1-4-2020		
Voornaam	5.1.2e		
Oordeel RIVM			

### Advies:

#### Type protectieschort bij uitgifte:

- Isolatiejas (lange mouw) S/M 963  
 Isolatiejas (lange mouw) L/XL/XXL 965  
 Schorten 940

### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De testpersonen beoordelen op binnendoos en/of direct omsluitende verpakking op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het schort zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit, materiaal, sluitingen en pasvorm. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit schort zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

### Administratief

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
CE certificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Overige documentatie aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

### Prestatie levering

Oordeel testpersonen	Volgens website leverancier spatwaterdicht. Dunne jas. Spatwatertest uitvoeren! <i>↳ voldoet niet aan de norm          &lt; 5 cm ; norm &gt; 20 cm</i>
----------------------	--

BINNENDOOS		
1	Aantal schorten per binnendoos?	50, geen binnendoos aanwezig
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	
5	Staat een CE markering op de doos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja op verpakking <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> 93/42/EEG
	Staat er een notified body onder de CE markering nummer op de doos	<input type="checkbox"/> Ja, nummer..... <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> NEN-EN 13795 <input type="checkbox"/> 89/686/EEG <input type="checkbox"/> NEN-EN 14126 <input type="checkbox"/>
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/>
8	Heeft de instructie betrekking op het schort in de doos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

**Bijzonderheden:**

VERPAKKING OM HET SCHORT			
1	Zit er verpakking om het schort? Zo ja: Plastic hoes	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:	

**Bijzonderheden:**

HET SCHORT	
1	Algemene indruk schort? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het schort overeen met de foto op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het schort: Label: Emdamed M EMD 95132
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het schort staat?
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?
4	Waar is het materiaal van gemaakt? <input checked="" type="checkbox"/> Non-Woven <input type="checkbox"/> Non-Woven SMMS <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/> Onbekend
5	Heeft het schort een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Heeft het schort lange mouwen? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Worden de mouwen afgesloten met een elastisch manchet? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
8	Sluit het schort ook de rug af? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
9	Tot welke hoogte is het schort? <input type="checkbox"/> Boven knie <input checked="" type="checkbox"/> Tot aan knie <input type="checkbox"/> Tot aan enkels <input type="checkbox"/> Overall <input type="checkbox"/>
10	Hoe wordt schort bevestigd? <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting nek <input checked="" type="checkbox"/> Striksluiting taille <input type="checkbox"/> Haltersluiting nek <input type="checkbox"/> Ritssluiting <input type="checkbox"/>
11	Hoe zitten de sluitingen aan het schort vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input checked="" type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/>
12	Wat is de kwaliteit van de sluitingen? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input checked="" type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

Pasvorm schort			
1	Hoe past het schort?		<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Te strak <input type="checkbox"/> Te ruim <input type="checkbox"/> Niet sluitend <input type="checkbox"/>
2	Waar past het schort niet/slecht		<input type="checkbox"/> Armen <input type="checkbox"/> Benen <input type="checkbox"/> Romp voorkant <input type="checkbox"/> Romp achterkant <input type="checkbox"/>
3	Kan het schort met de sluitingen worden getrokken?	strakker	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, strikssluiting <input type="checkbox"/> Nee
4	Wat gebeurt er bij bewegingen?		<input checked="" type="checkbox"/> Schort blijft goed zitten <input type="checkbox"/> Schort opent of scheurt <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

Dun weefsel. Spattest uitvoeren.

→ voldoet niet: < 5cm  
 moet minimaal 20cm zijn  
 EN 13795.



Stelling 22

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum: 01-04-2020

Artikelnummer: -----

Lotnummer 113

Inkooporder nummer -----

Aantal inkooporder/pakbon -----

Aantal pallets

2

Totaal stuks

3600

Aantal per pallet

2 x 1800

Aantal per doos

50

Aantal per verpakkingseenheid

1

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

 JA /  NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: -----

Paraaf: -----

Aantal afgehaald voor controle

3

Verpakt per

1

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:



# Pakbon

**Afleveren bij:**

Ministerie VWS  
Parnassusplein 5  
2511 VX 's-Gravenhage

Uw ordernummer: 3057-23300

Uw orderdatum :

Pakbonnummer : 4845528

Pakbondatum : 31-03-2020

Ordernummer : 5208823

Vervoerder : General Logistics Sy

Klantnummer : 120000

Artikelcode	Omschrijving	Eenheid	Besteld	Geleverd	Na te		Reeds	Batchnummer
					Leveren	Geleverd		
EMD95132	Isolatiejas Non Woven, blauw met tricot manchet, maat M	50 pcs	72	72	0	0		
								MS44032892B
								MS44032892B

Bij twijfel aan de geleverde zending svp binnen 5 dagen contact met ons opnemen.

Let wel: geopende verpakkingen kunnen en mogen niet retour worden gezonden/genomen.

Telefoonnummer: 5.1.2e

Orderpicker : \_\_\_\_\_

Totaalbedrag voor deze order 2.090,88

Ordercontroleur : \_\_\_\_\_

EmdaMed B.V.  
Morsestraat 22  
2852 XG Berkel en Rodenrijs  
The Netherlands

T: 5.1.2e  
F: 5.1.5 @ emdamed.nl  
W: www.emdamed.nl

IBAN 5.1.5  
BIC  
KvK 27109269  
BTW 5.1.5