

## Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum:

Inkoopnummer	
Lotnummer	41
Productnaam	disposable mask
Leverancier	Tongivan
Type mondk masker	KN95

productiedatum 19-03-2020

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM			—	5.1.2e
Oordeel AH/TOXI		+/-	—	

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	65.9 %	5.1.2e

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	< P1		

Onze beoordeling type mondk masker
<p>Raan dat de lagen hier <del>is</del> omgewisseld zijn - (wol/elektrost)  <del>Dat is</del> zou reden voor afkeuring kunnen zijn.            Afkeuring op basis van penetratietest            en fittest.</p>

Ready to GO (JA/NEEN)
Nee, afkeuring.

## Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer		Lotnummer: 41
Leverancier	Tong Lian	
Productnaam	3D Folding disposable mask	
Datum	29 maart 2020	
Naam	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeidshygiënist <input type="checkbox"/> Toxicoloog	
Besproken met RIVM	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	
Advies:	Afkennen op basis van penetratietest en fittest	
Type masker bij uitgifte:	FFP2/KN95	

### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Onduidelijk voor mij of alles met de certificaten in orde is.	

### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	De volgorde van de lagen is hier anders dan bij de andere partijen, die ik voorbij heb zien komen. De wollen laag zit hier direct achter de buiten laag. Bij de andere maskers zat de elektrostatische laag vlak achter de buiten laag. Voor de rest geen afwijkingen.
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde</li> <li><input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:</li>   <li><input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:</li> </ul>
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3D Folding disposable mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Tong Jian
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> EN 149 (FFP)</li> <li><input type="checkbox"/> N95</li> <li><input type="checkbox"/> KN95</li> <li><input type="checkbox"/> P2 (Australia)</li> <li><input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea</li> <li><input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--</li> <li><input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical)</li> <li><input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical)</li> <li><input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Anders: GB 2626-2006</li> <li><input type="checkbox"/> Geen</li> </ul>
7	Is er een instructie bijgeleverd? <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos</li> <li><input type="checkbox"/> Los in de doos</li> <li><input type="checkbox"/> Ontbreekt</li> </ul>
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ja</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Nee, op los papiertje <b>productiedatum:</b> <b>2020-3-21</b></li> </ul>

**Bijzonderheden:**

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: Het zijn twee maskers in één verpakking.	
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:  De bevestiging van de elastieken ziet er anders uit op de doos. En de chinese dame draagt een masker zonder metalen neusstuk.

**Bijzonderheden:**

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:  Stiksel en neusstuk
3	Wat staat er op het masker:  KN95
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 buiten <input checked="" type="checkbox"/> 2 wollig <input checked="" type="checkbox"/> 3 Wollig <input checked="" type="checkbox"/> 4 Electrost <input checked="" type="checkbox"/> 5 Binnen
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> (schuim)rubber strip aan de binnenkant <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

De volgorde van de lagen is hier anders. De wollen laag zit hier direct achter de buiten laag.

Bij de andere maskers zat de elektrostatische laag vlak achter de buiten laag.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input checked="" type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input checked="" type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

**Bijzonderheden:**

Masker zit hoog op de neus. Kan hinder geven met spatbril. Lijkt ruimer bij de wangen.

**Fittest (norm = 100)**

Datum: 29/3/20

Inkoopnummer	<del>918</del>
Lotnummer	41
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	FFP2

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

- masker zit ruim "prikt in oog"  
zonder clip

5.1.2e

-  
zonder clip: 2,6 / 3,5  
met clip 7,6 / 15

Tonglian binnen gekomen op:  
27103

### Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 28 mei. 2020

Inkoopnummer	
Lotnummer	41
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	KN95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	68,6%	Fail for P1
Masker 2	65,6%	Fail for P1
Masker 3	63,4%	Fail for P1
Totaal gemiddelde	65,9%	Fail for P1

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet <del>aan</del> <sup>niet</sup> aan klasse P1
5.1.2e

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e Datum: 27-03-20  
 Artikelnummer: \_\_\_\_\_ Lotnummer: 41  
 Inkooporder nummer: \_\_\_\_\_  
 Aantal inkooporder/pakbon: \_\_\_\_\_

Aantal pallets	<u>37</u>
Totaal stuks	<u>208.900</u>

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon JA / NEE

Zo niet Telling bevestigd door Naam: \_\_\_\_\_  
 Paraaf: \_\_\_\_\_

Aantal afgehaald voor controle	<u>1a.</u>
Verpakt per	<u>50</u>

Kwaliteitscontrole RIVM JA / NEE

Bijzonderheden:

36 x 8000 1x 2900