

## Eindbeoordelingsformulier mondmaskers

Datum	13/4
Inkoopnummer	300362
Lotnummer	47
Leverancier	Papal
Productnaam of naam fabrikant	Papal
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	g58

	+	+/-	-
OordeelRIVM			-
OordeelAH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde	
Particle Penetration	96,1 op 0,3 µm	98,8 op 0,5 µm
Algemene bevindingen:		

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	10	13
Test 2	10	21
Test 3		
FFP2 (Ja/Nee)		

Waterkolom	Gemiddelde	Standaarddeviatie

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)			
Artikelnummer VWS:			
Algemene bevindingen:			
Logistiek (aankruisen)	PFE	FIT	Classificatie
Mand 1	>94%	>100	FFP2
Mand 2	>94%	33<FIT<100	FFP2 met instructie over FIT
Mand 3	80%<PFE<94%	>100	FFP1, filter van mindere kwaliteit
Mand 4	80%<PFE<94%	33<FIT<100	FFP1, buiten actieve zorg, met instructie over FIT
Mand 5	>94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood + met clip
Mand 6	80%<PFE<94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood
Mand 7	<80%	Ongeacht fit	Niet gebruiken

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	417.
Datum uitvoering check	13-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	KN95 -		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies:	niet uitgeven vanwege slechte fit		
Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	slechte fit	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	FFP2, niet uitleveren vanwege slechte fit
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <span style="float: right;">?</span>	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNGI - GB2226-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

## Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	417
Datum	13-4-2020		
Productnaam			
Leverancier			
Type mondmasker	FFP2		

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	10	13
5.1.2e	18	31

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	ok	ok
Verschuift bij Up & Down/Bending?	nee	nee nee
Is één clip voldoende?		stap 2 ja
Overige		

## Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	300362	LOT-nummer	417
Datum	13 apr 2020		
Productnaam			
Leverancier	Papacal		
Type mondmasker	KN95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	95,7	P2	98,7	P2
Masker 2	98,2	P2	99,4	P3
Masker 3	94,4	P2	98,3	P2
<b>Totaal gemiddelde</b>	96,1	P2	98,8	P2

Eindoordeel > 0,3

Voldeed aan de eis van FFP2

Eindoordeel > 0,5

Voldeed aan de eis van FFP2

staat tussen dock 17 en 18

**Inboekrapport VWS**

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

13-4-2020

Aantal inkooporder/pakbon

300362

Lotnummer

417

Aantal pallets	2
Totaal stuks	10.800
Aantal per pallet	6.000
Aantal per doos	1.200
Aantal per verpakkingseenheid	1

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle  
Verpakt per

10 ~~8~~  
1

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

300362

LCH-nummer

3057-23224A

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

KN95 maskers

verplichtingen nr. 3057-23224A

ingeboekt door:

Locatie:

16-94-1 7m 19-96-1



**PAKBON**  
**PFFN036332-3**

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2h

Popal Fietsen Nederland B.V.  
Huub van Doorneweg 2  
5151 DT Drunen  
Nederland  
5.1.2e @popal.nl

Documentdatum: 09 april 2020  
Offertenummer: PFFN036332-3  
Betalingscondities: Binnen 2 werkdagen na levering  
Verzendwijze: Luchtvracht AMS (Schiphol)

Nr.	Omschrijving	Aantal besteld	Eenheid	Aantal geleverd
KN95-MASK	MOND MASKER	5.1.1c	STK	5.1.1c
				<b>GELEVERD</b>
			10-04-2020	5.1.1c
				<b>TOTAAL GELEVERD</b>
			28-03-2020	5.1.1c
			09-04-2020	
			10-04-2020	

Verplichtingen nummer: 3057-23224

Opdrachtgever: 5.1.2e  
Levering: vrijdag 10 april 2020

Fysiek gecontroleerd en akkoord voor ontvangst:

NAAM:
HANDTEKENING:

**Terms and conditions**

In geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden, waaronder Popal Fietsen Nederland B.V. verstaat een omstandigheid waarop Popal Fietsen Nederland B.V. geen invloed heeft en die de levering c.q. prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, transportvertraging, overheidsbelemmingen en/of niet tijdig leveren door leverancier kan Popal Fietsen Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld. Popal Fietsen Nederland B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard, de verwachten duur van de overmacht.