

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	20-4-2020
Inkoopnummer	300771
Lotnummer	479 - 472
Leverancier	Malma
Productnaam of naam fabrikant	Stakbuss
Productiedatum	26-3-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	nvt	200+
Testpersoon 2	194	past niet met clip
Testpersoon 3	nvt	140
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen: Penetratie test is goed. Fittest goed met clip (>100). * Let op: 1 testdoosje; normaal 3 stuks. 22/04/20: extra fittest uitvervoer: goed (>100) met niet clip?			

Quality Check:	Uitleg indien On Hold:
<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Artikelnummer VWS	
Algemene bevindingen: 1 testdoos, dus geen vgl. kunnen doen. 20/4/20 22/4/20, testen ok.	

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1	X	Goedkeur: FFP2	niet	>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* Let op: elastieken laten gemakkelijk los. maskers geven een beetje

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	472
Datum uitvoering check	20/4/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Halma		
Productnaam of naam fabrikant	Starbuss - 3D Nano Facial Prot. Mask		
Productiedatum	26/03/2020		
Naam	[Redacted]		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<p>Nalooft goed bij penetratietest. De oede fittest bij inzet clip (>100)!</p> <p>let op: 1 doos in test doos. Maakt 3 en dan zie je bij Starbuss soms verschillende maskers. Qua vorm en dus fittest.</p> <p>22/04/2020 → extra testen zijn goed. ✓</p> <p>elastieklips laten wel makkelijk los</p> <p>Maskers geven een beetje</p>
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>16</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde. <i>Wetmatig 1 doos en al geopend.</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano Facial Protective Mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Starbus</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input checked="" type="checkbox"/> N95 (<i>N95</i>) <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 years</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>Per 2 stuks.</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk, <i>knip scheef sleut</i> <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>- metaal in metaal buitenzijde maken - scheut ons zit in de stof. - geen opdruk op bevestiging.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95 GB2626-2006</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>maar op verpakking</i> <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>staat nog meer.</i> <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>zie verpakking</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem, <i>maar schiet er nog kwaliteit bij</i> <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los <i>los!</i>
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest? <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Moore score qua fit.
 Twee 4/3 meer dan 100, bij inzet clip.
 1 goed zonder de clip!

Let op: in de testdoos met lot 472 zat maar 1 doos. Al deze maskers waren netjes geïmpeerd.

Normaal 3 testdozen. Dan zie je bij starbuss nogal eens verschillen tussen de maskers qua vorm. Dus ook grote verschillen qua fit!

Fittest by RIVM

Datum	20-4-20
LOT/Z/X-nummer	10472

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	--	---

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
	n.v.t	200 ^t
5.1.2e	179	pasd niet met 1 clip
	NUT	148

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	Zit goed zit ruim (same)	Zit goed
Vershuift bij Up & Down/Bending?	nee	nee
Is één clip voldoende?		Ja
Extra opmerkingen	Stinkt naar aceton	

Type FFP Masker	b3
Fit test (FAIL of PASS)	pass

Particle Penetration by

5.1.2e

Datum	20 apr 2020
Inkoopnummer	300771
LOT /X /Z-nummer	472

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	P3	100%	P3
Masker 2	99%	P3	100%	P3
Masker 3	100%	P3	100%	P3
Totaal gemiddelde	100%	P3	100%	P3

Eindoordeel > 0,3

Voldoet aan de eis van P3

Eindoordeel > 0,5

Voldoet aan de eis van P3

Particle Penetration by 5.1.2e

Datum	22 apr 2020
Inkoopnummer	300771 LOT 472 extra test
LOT /X /Z-nummer	LOT 472 extra test

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	Pass for P3	100%	Pass for P3
Masker 2	99%	Pass for P3	100%	Pass for P3
Masker 3				
Totaal gemiddelde	100%	Pass for P3	100%	Pass for P3

Eindoordeel > 0,3

Voldoet voor P3.

5.1.2e

Eindoordeel > 0,5

Voldoet voor P3.

5.1.2e

Fittest by RIVM

Datum	22/4
LOT/Z/X-nummer	472

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	---	--

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	15	192
	realtime < 10	5
	realtime < 10	200+

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	neusclip slap	2at wrap bg neus
Verschuift bij Up & Down/Bending?	ja	Ja nee
Is één clip voldoende?		Ja ja
Extra opmerkingen	Niet zo figne gear zit prettig	

Type FFP Masker	P3
Fit test (FAIL of PASS)	PASS

K2G19U11HBEWIJS AFGELEVERDE GOEDEREN

bonnummer :		opslag :	5.1.2h
vrachtbrief:	5.1.2h	housebrief:	
dossiernr :			5.1.2h

merken & nummers	aantal	ck	bruto	gew	locat.	omschrijving	en	dokument
------------------	--------	----	-------	-----	--------	--------------	----	----------

5540422041	35	KA	244,000	000039	KN 95 MASKER			
						IMA 20NLK945T1AH51WD57		

Opmerkingen:

Ondergetekende verklaart de goederen droog en goed geconditioneerd te hebben ontvangen, op 17-04-20 om 21:38 uur, van UPS-SCS (NEDERLAND) BV

DGVS code :
 naam : handtekening: _____

Identific. :
 aangever : 5.1.2e

Van toepassing zijn de Nederlandse Expeditie voorwaarden, gedeponneerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam, Rotterdam en Breda, laatste versie. Alle noteringen zijn vrijblijvend.

Geregistreerd onder nummer 40884 bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

18-04-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

472

Aantal pallets

4

Totaal stuks

20160

Aantal per pallet

5104

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per~~16~~ 48
16

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

300771

LCH-nummer

3057-23160-WHY0417

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

ingeboekt door:

Locatie: