

Eindbeoordeling - Ready to Go

Datum: 29/3

Inkoopnummer	39337
Lotnummer	55
Productnaam	protective mask, KN95
Leverancier	Arch en Flook
Type mondk masker	KN95

	+	+/-	-	Naam beoordelaar
Oordeel RIVM	+			5.1.2e
Oordeel AH/TOXI	+			

	Testgemiddelde	Naam beoordelaar
Particle Penetration	98%	5.1.2e

	FF Pass Level	FFP2 (JA/NEEN)	Naam beoordelaar
Fittest	P2	Ja	5.1.2e

Onze beoordeling type mondk masker
De zak kan steviger. Masker kan wat oost klein. Metaal neusstuk blijft goed. Geeft hoop van fittest. clip nodig

Ready to GO (JA/NEEN)
5.1.2e

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer	39337	Lotnummer: 55
Leverancier	Suzhou Le Protective Products (Arch & Hook partij)	
Productnaam	Protective mask KN95	
Datum	29 maart 2020	
Naam	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e <input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e	
Functie	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/>	
Besproken met RIVM	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/>	
Advies: <i>Goedkeuren</i> Type masker bij uitgifte: <i>FF P2</i>		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Wacht op formulieren RIVM <i>-> documentatie niet conform eisen.</i>	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	De zak om de maskers heen is niet stevig. Het masker zelf zou wat aan de kleine kant kunnen zijn. Vond de metalen neusstuk goed buigzaam! Benieuwd naar de fittest.
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	20
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: Het is een plastic zak, opengescheurd en niet zo stevig <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Protective mask KN95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Suzhou Le Protective Products
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> Anders: GB 2626-2006 <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee Wel een productiedatum: 17-03-2020

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt alleen zak aanwezig <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN95 en GB 2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 Plastic gaas <input checked="" type="checkbox"/> 2 Electro-statisch <input checked="" type="checkbox"/> 3 wollig <input checked="" type="checkbox"/> 4 Fijn gaas <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> (schuim)rubber strip aan de binnenkant <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Ziet er goed uit!!

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, maar zit strak genoeg. <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Het metalen neusstuk bestaat uit twee metalen draadjes. Is goed in de vorm van de neus te vormen. Ben benieuwd naar de fittest.

Bij het bewegen van het hoofd verschuift het masker. Oogt wat klein.

Particle Penetration > 0,3 Mcron

Datum: 29/03/2020

Inkoopnummer	39337
Lotnummer	55
Productnaam	
Leverancier	
Type mondmasker	KN-95

	Gemiddelde rendement	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	98,0 %	Pass for P2
Masker 2	98,0 %	Pass for P2
Masker 3	98,1 %	Pass for P2
Totaal gemiddelde	98,0 %	Pass for P2

Eindoordeel (P1/P2/P3)
Voldoet aan de eis voor P2

5.1.2e

Fittest (norm = 100)

Datum:

Inkoopnummer	39337
Lotnummer	55
Productnaam	
Leverancier	Arch & Hook
Type mondmasker	

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Scherp randje aan de kin

	L.	P
Zonder clip	19	34
Met clip	15	35

On Hold

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

20-3-2020

Artikelnummer:

958

Lotnummer

55

Inkooporder nummer

39337

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

2

Totaal stuks

20.000

Aantal per pallet

Aantal per doos

Aantal per verpakkingseenheid

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

n.a.

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD

AFGEKEURD

Bijzonderheden: