

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	15-05-2020
Inkoopnummer	302236
Lotnummer	087
Leverancier	Halma
Productnaam of naam fabrikant	5.1.2e
Productiedatum	05-03-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 KN95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	100
Testpersoon 2	<10	31
Testpersoon 3	<10	4
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
950	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Particle Penetration by Kalibra

Datum	15 Mei 2020
Inkoopnummer	302236
LOT/X-nummer	887

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	100%	Pass P3	100%	Pass P3
Totaal gemiddelde	100%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	141	< 240 Pa	pass
Masker 2	126		pass
Masker 3	171		pass




Eindoordeel > 0,3
voldoet P3
Eindoordeel > 0,5
voldoet P3


Fittest by RIVM

Datum	15-05-20
LOT/X-nummer	lot 882

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Doos 1
Doos 2
Doos 3

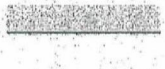Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 		<10		100
2. 5.1.2e		<10		31
3. 		<10		14
4. 				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				nee
			Is één clip voldoende?	ja

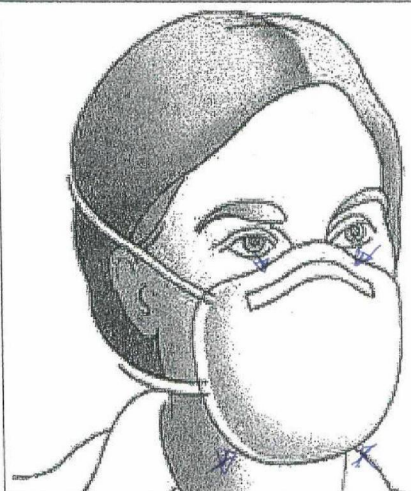

n: lekt bij neus, kin

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	FAIL

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	087 -
Datum uitvoering check	15-5-2020 -		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	5.1.2e		
Productiedatum	5-3-2020 -		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies:

Type masker bij uitgifte:

afneem op fit

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Belede status. Geen doc.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Maskers verschillen in - grootte - stof buitenkant - - lengte oorelastieken
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 25	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D nano Facial Protective mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	HLE Starbus techn. group 5.1.2e
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>pers</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN 95 GB2026 2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

- minimaal 3 verschillende maskers
- neusbeugel (aant) niet los
- verschil in grootte

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: _____

5.1.2e

Datum: _____

14-05-2020

Aantal inkooporder/pakbon _____

Lotnummer _____

887

Aantal pallets

16

Totaal stuks

230.000

Aantal samples

8 75

Totaal aantal na samples

~~229.987~~ 229.925

Aantal per pallet

15000

Aantal per doos

1000

Aantal per verpakkingseenheid

25

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: _____

958

Inkooporder nummer _____

302236

LCH-nummer

3057-23160

5.1.2e

0513C

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

18-173-02

ingeboekt door:

4m 18-203-02

2

Exemplaire pour destinataire LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 Exemplair voor geadresseerde VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
 Exemplar für Empfänger FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer

No Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
 Absender (Name, Anschrift, Land)

Halma Solutions
 Yzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

NL 20062153

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
 Empfänger (Name, Anschrift, Land)

5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

OG logistic services bv
 Yzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

3 Lieu et date de la livraison de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

5.1.2e Nederland

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

14-5-20
 Beuningen Nederland

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
 Beifügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers 7 Nombre de colis / Aantal colli 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen 10 No. statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg 12 Cubage, m3 / Volume in m3

Verplichtingsnummer: 3057-23160

lot 37-16 pp, 230 dozen, 230.000 stuks
 X016- 5.1.2e

lot 15-3 pp, 46 dozen, 46.000 stuks
 X016- 5.1.2e

lot 15-1 pp, 8 dozen, 46000 stuks
 X019- 5.1.2e

14 MAY '20 15:43

11 europallets
 10 ww

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Vereinbarungen

20	Arrivé heure / Aankomsttijd Ankunsftszeit	Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit
Adresse de chargement: Laadresse: Ladeadresse:			
Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:			

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
 Frachtzahlungsanweisungen

Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te
 Ausgefertigt in

Beuningen 14-5-20

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22

OG Logistic Services B.V.

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
 Gut empfangen

5.1.2e

11 europallets

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 1-15, 19 + 21 + 22

version 6.0 14/03/19 model IRU

logistiek