

## Eindbeoordelingsformulier

Datum	8-4
Inkoopnummer	300050
Lotnummer	362
Leverancier	Morrison Express Nederland
Productnaam of naam fabrikant	KN95
Productiedatum	24-03-2020
Type mondkap (volgens de fabrikant)	958 (voldoet ook niet als 95-7)

	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen:

Masker heeft slechte fit. Voldoet niet aan  
 gehanteerde ondergrens van 2 of 3 testen op  
 minimaal 33. Getest voor zowel met als zonder clip

	Testgemiddelde	
Particle Penetration	>0,3: 92,9%	>0,5: 97,5%
Algemene bevindingen:	Voor P1 op >0,3 en P2 op >0,5	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	3,7	4,6
Test 2	1,3	2,7
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)	nee	nee

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)

Masker voldoet niet; vanwege slechte fit test.

Artikelnummer VWS:

Algemene bevindingen:

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	300050	LOT-nummer	362
Datum uitvoering check	9/14/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Morrison Express Netherlands		
Productnaam of naam fabrikant	KN95 - a chinese test		
Productiedatum	24-03-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Afhew. <span style="float: right;">US</span>	

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<p>Nolooft niet als FFP2 in Pi-masker</p> <p>Redenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fittest nolooft niet</li> <li>- Elke documentatie ontbreekt</li> </ul>
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>10 in volledig doorzichtige folie zonder opdruk</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>niets; los label in verpakking Chinees tekst.</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>?</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>misschien? 05 jr?</i>

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>per 10 stuks, zie ook de h/e</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>KING5</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>in: wit PP vilt 2x meltblown wit: PP</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	<p>Hoe past het masker op het gezicht?</p> <p><input type="checkbox"/> Goed</p> <p><input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen</p> <p><input type="checkbox"/></p>
2	<p>Waar ontsnapt lucht bij de leaktest</p> <p><input type="checkbox"/> Niet</p> <p><input type="checkbox"/> Neus</p> <p><input type="checkbox"/> Kin</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zijkant</p> <p><input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)</p>
3	<p>Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nee</p> <p><input type="checkbox"/> N.v.t.</p>
4	<p>Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?</p> <p><input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <i>omhoog</i></p> <p><input type="checkbox"/></p>

*zie figuur*

*omhoog*

Bijzonderheden:

## Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	300050	LOT-nummer	362
Datum	09 apr 2020		
Productnaam			
Leverancier			
Type mondk masker	KN 95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	95,0 %	P2	98,5 %	P2
Masker 2	93,0 %	P1	97,6 %	P2
Masker 3	90,7 %	P1	96,4 %	P2
<b>Totaal gemiddelde</b>	<b>92,9 %</b>	<b>P1</b>	<b>97,5 %</b>	<b>P2</b>

Eindoordeel > 0,3

pass for P1

Eindoordeel > 0,5

pass for P2

## Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	362
Datum			
Productnaam			
Leverancier			
Type mondk masker			

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	3.7	4.6
	13	27

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	Drukt <del>op</del> onder het oog	Drukt op onder ooglid, 2d (naor.)
Vershuift bij Up & Down/Bending?	nee	nee
Is één clip voldoende?		nee, extra verlenging is nodig
Overige		oor buigt aan één kant

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

8-4-2020

Artikelnummer:

Lotnummer

362

Inkooporder nummer

300050

Aantal inkooporder/pakbon

Aantal pallets

22

Totaal stuks

338400

Aantal per pallet

16.000

Aantal per doos

800

Aantal per verpakkingseenheid

10

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle

30

Verpakt per

10

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Los Ref 3057 233355

# Uitslagbon



INDEPENDENT WORLD SERVICES BV

Changiweg 1 1437 EP Rozenburg-Schiphol  
 PO Box 75845 1118 ZZ Schiphol-Airport  
 +31 (0)20-354 0069 info@iws-schiphol.nl

www.iws-schiphol.nl

Zendingnr. U200011478  
 AWB nr. 999-75715146 Aantal colli 626  
 HAWB nr. CN101823885 Gewicht 3690  
 Klant Morrison Express Netherlands  
 B.V.



U200011478

IWS BV

Pagina 1

ALEXANDER

8-4-2020

Report 70003

Documentnr. 20NLK8PWVLARE9WD50

Handtekening

Uitslagdatum 8-4-2020

Uitslagtijd 11:30



ATO Date 30-03-20

Pasnummer 5.1.2e

Schade

Pasnaam 5.1.2e

los ref: 3057-233355

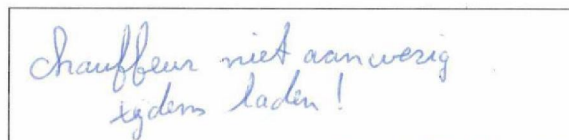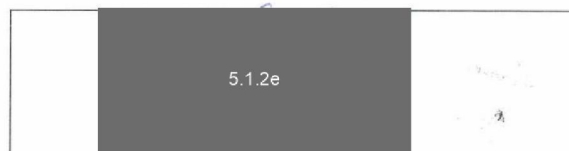

## DGVS Uitslaggegevens

Referentie type	HWB	Aantal colli	626
Referentienr.	CN101823885	Gewicht	3.690
DGVS deelnemer			

**Deze gegevens exact zo overnemen in uw administratie bij uw inslagtransacties om DGVS mismatches te voorkomen.**

