

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

26-3-20

Artikelnummer:

9999999965

Lotnummer

9

Inkooporder nummer

5.1.2h

Aantal inkooporder/pakbon

10.000

Aantal pallets

21

Totaal stuks

10.025

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf

5.1.2e

Aantal afgehaald voor controle

18

Verpakt per

105

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

Bijzonderheden:

OP locatie

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

diag. overall

Inslagnummer of Gift-nummer	07301	
Leverancier		
Productnaam	Essers scherpen	
Datum	26-3-2020	
Naam	<input checked="" type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e	5.1.2e
Functie	<input type="checkbox"/> AH <input type="checkbox"/> Toxio	
Besproken met RIVM	<input type="checkbox"/> 5.1.2e <input type="checkbox"/> 5.1.2e	
Advies:		
Type masker bij uitgifte:		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Goedkeuren Goedgekeurd	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Goedkeuren Goedgekeurd
----------------------------	-----------------------------------

5.1.2e

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?		
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?		
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?		
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee

norm
onbekend.

Bijzonderheden:

overall

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input checked="" type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER <i>Overall</i>	
1	Algemene indruk masker? <input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>Jaaken in overall</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker:
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Mentaal in de stof <input type="checkbox"/> Mentaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		<i>not.</i>
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Loodsrapport van Koolwijk Op- & Overslag B.V.

Inslag Nr.: 87381

Dossier Nr.: 66871

Datum: 25-03-2020
 Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
 Autonr.: /
 Referentie: ESSERS 756-9634-0843

Goederen omschrijving: ON HOLD

Aantal colli: 400000 PCS 10000

Aantal pallets:

Bruto gewicht: 0 KG

Containers:

Hoeveelheid per pallet: -

$36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36 + 36$
 $+ 23 + 34 + 19 + 36$
 400 dozen

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro pallet :

Gelost door:

Geteld door:

Prod. Datum:

T.H.T.

Palletfactor

verschillende maten!
 25 /doos = 10000

Overige opmerkingen:

Gelost in vak/loods/stelling:

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

ATTENTIE CHAUFFEURS:

VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!