

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	02-07-2020
Lotnummer	1913-1
Leverancier/LCH-nummer	3053-23164-09.
Productnaam of naam fabrikant	Hioriaocan
Productiedatum	19-06-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	100%	P3
Masker 2	99%	P3
Masker 3	99%	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1		90
Testpersoon 2		60
Testpersoon 3		44
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI	+	+/-	-

Artikelnummer VWS	Quality Check
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input checked="" type="checkbox"/> 971 (KN95)	
Algemene bevindingen: Filter materiaal prima, fit is voldoende. Afkeur omdat er onregelmatigheden zijn in certific binnendoos (foto) test rapportage (foto)	

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	JA	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	02-07-2020
Lotnummer	1913-2
Leverancier/LCH-nummer	3057-23164-09
Productnaam of naam fabrikant	Hioriacon
Productiedatum	19-06-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	98%	P2
Masker 2	96%	P2
Masker 3	99%	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1		64
Testpersoon 2		64
Testpersoon 3		52
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI		+/-	

Artikelnummer VWS	Quality Check
<input checked="" type="checkbox"/> 971 (KN95)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen: Filter materiaal prima, fit voldoende Afkeur omdat er onregelmatigheden zijn - binnen doors (foto) - test rapportage.	

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	JA	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* Ingekoht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

①

Particle Penetration by Kalibra

Datum	2-7-2020
Inkoopnummer	305367
LOT/X-nummer	1913-1

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement $\geq 0,3$	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	100%	Pass P3
Masker 2	99%	Pass P3
Masker 3	99%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	75	< 240 Pa	Pass
Masker 2	80		Pass
Masker 3	75		Pass

Eindoordeel $\geq 0,3$:

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.

- fail
 voldoet P1
 voldoet aan P2
 voldoet aan P3

Zie formulier ②

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

②

Particle Penetration by Kalibra

Datum	2-7-2020
Inkoopnummer	305367.
LOT/X-nummer	1913-2.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement $\geq 0,3$	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 4 Pass 4	98%	Pass P2
Masker 5 Pass 5	96%	Pass P2
Masker 6 Pass 6	99%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 4	80	< 240 Pa	Pass
Masker 5	102		Pass
Masker 6	72		Pass

Eindoordeel $\geq 0,3$:

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.

- fail
 voldoet P1
 voldoet aan P2
 voldoet aan P3

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Fittest by RIVM

Datum	2/7/20
LOT/X-nummer	1913-2

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
5.1.2e <i>doos 5</i>	<i>met steekje (1/2) d.p</i>			<i>64</i>
2. 5.1.2e <i>doos 4</i>				<i>87</i>
5.1.2e <i>doos 6</i>				<i>52</i>
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending? <i>(ja)</i>			Is één clip voldoende? <i>ja.</i>	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
		<i>masker doet mijn en verschuift makkelijk</i>		

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	<i>Pass</i>


Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dlt bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



Fittest by RIVM

Datum	2/7/20
LOT/X-nummer	1913-1

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e (1)	shakke (korte) clip.			44/90
2. 5.1.2e (2)			koortjes in gat van de clip	50
3. 5.1.2e doos	3.			44
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			Is één clip voldoende?	Ja
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
		 <p>masker zit heel ruim (grote maat) masker bestaat bij uitademen masker slijft makkelijk omdat het korte clip daarom grote spreiding in de fit getallen</p>		

Lv: kiert

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	Pass

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	305367	LOT-nummer	1913-2
Datum uitvoering check	2 juli 2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Hiorialon		
Productnaam of naam fabrikant	KN 95 protective mask		
Productiedatum	19-06-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies: *Afleren*
 Type masker bij uitgifte:

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<p>+ masker heeft filterkwaliteit P2, en voldoende fit ^{mits met clip}</p> <p>- foto op doos wijkt af van echte masker.</p> <p>- op masker staat FFP2, op doos KN95</p> <p>- foto op certif certificaat heeft andere opdruk dan daadwerkelijk masker. Op certif staat</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ook CE en 2163
1

binnenstaat

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	30
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	KN 95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Hioricon
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee los vel.

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

LCH & WWS use only

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>masker op doos heeft rechte zijkant rechte mond is rond.</i>
3	Wat staat er op het masker:
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>buit wit met bl</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>met b</i> <i>was wol</i> <i>wit dun-</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest? <input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is? <i>wvt</i>
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem? <i>wvt</i>

Bij een chirurgisch masker			
Doos	Materiaal neusbeugel	Breedte neusbeugel	Lengte van het uitgeklapte masker
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	305367	LOT-nummer	1913-1 <i>WNA</i>
Datum uitvoering check	2 juli 2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Miozia <i>win</i>		
Productnaam of naam fabrikant	KN 95 protective mask.		
Productiedatum	19-06-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			

Advies: *Afkeuren.*
 Type masker bij uitgifte:

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<p><i>+ masker heeft goede filterkwaliteit en voldoende goede fit. mits met clip.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Staat onder masken foto op de doos met rechte zij kant. - masken beslaat er is vrij gewot - op masken staat FFP2, op de doos KN95 masken - foto op certificaat heeft andere opdruk dan echte masken
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 30
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? KN95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Miozia bn
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australië) <input type="checkbox"/> KMOEL-2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--) <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee los vel-

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

LCH & VWS use only

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>masker op doos heeft rechte zijkant echte masker is rond.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95 FFP2 EN149:2001 AI: 2009</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <i>buiten</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <i>wit</i> <input checked="" type="checkbox"/> 2 <i>meltbl</i> <input checked="" type="checkbox"/> 3 <i>meltbl.</i> <input checked="" type="checkbox"/> 4 <i>wol</i> <input checked="" type="checkbox"/> 5 <i>wit dun</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <i>leuk</i>
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest? <input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is? <i>nvt</i>
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem? <i>nvt</i>

Bij een chirurgisch masker			
Doos	Materiaal neusbeugel	Breedte neusbeugel	Lengte van het uitgeklapte masker
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

30 / 6

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

~~1171010~~ 1913

Aantal pallets	5.1.1c
Totaal stuks	
Aantal samples	
Totaal aantal na samples	
Aantal per pallet	
Aantal per doos	
Aantal per verpakkingseenheid	

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

303

LCH-nummer

3057/23164 - 09

305367
exp dat: ??

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD


Bijzonderheden:

Locatie:


15 - 122 - 01

ingeboekt door:

LETRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT-VRACHTBRIEF-VERVOERSDOCUMENT-FRACHBRIEF

1 Shipper / Absender / Afzender Globenet as agent for : O2 health Heerhugowaard The Netherlands		CMR AVC - 2002 NL 789296 347368	
2 Destinataire / Empfänger Centraal Boekhuis Laanakerweg 14		16 Transporter Globenet BV Schiphol, NL  <small>WHOLESALE EXPRESS SERVICE</small>	
3 Delivery Place, Country / Auslieferungsort Vianen / 4131PB		17 Following Transporters Schiphol Express	
4 Receipts Place and Date / Ort und Tag Übernahme Schiphol, 29-6-2020		E4	
5 Documents annexes / Bijgevoegde Documenten MAWB nr 784-13789296		18 Vorbehalt und Bemerkungen des Fahrers	
6 Omschrijving	7 Aantal	8 Verpakking	9 Soort
MASK (250crt = 269.700 MASK) VWS KENMERK: 3057-23164 *** Status "C" ***		16 EURO PALLETS	2282kg
		16 EURO'S GELAST 16 " BELAARDEN IVM 1 KAPOTTE	
13 Opmerkingen DELIVERY 30JUN.!	19 Speciale Afzender Overeenkomst	Geldsoort	Ontvanger
	Vrachtprijs		
	Kortingen		
	Saldo		
	Bijeenkomsten		
	Totaal:		
14 Frankeringsvoorschriften / Prescriptions: FRANCO	20 Besondere afspraken		
15 Remboursement			
21 Plaats en Datum opmaken Vrachtbrief: Schiphol, 29 JUN 2020	24 Goed Ontvangen / Plaats		
Afzender 5.1.2e	Transporter S/E	Date	Place
		Signature du Destinaire	

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT-VRACHTBRIEF-VERVOERSDOCUMENT-FRACHBRIEF

1 Shipper / Absender / Afzender Globenet's agent for : O2 health Heerhugowaard The Netherlands		CMR AVC - 2002 NL 789241 347367	
2 Destinataire / Empfänger Centraal Boekhuis Laanakkerweg 14		16 Transporter Globenet BV Schiphol, NL 	
3 Delivery Place, Country / Auslieferungsort Vianen / 4131PB		17 Following Transporters Schiphol Express	
4 Receipts Place and Date / Ort und Tag Übernahme Schiphol, 29-6-2020		66	
5 Documents annexes / Bijgevoegde Documenten MAWB nr 784-13789241		18 Vorbehalt und Bemerkungen des Fahrers	
6 Omschrijving	7 Aantal	8 Verpakking	9 Soort
MASK (250crt = 270.000 MASK) VWS KENMERK: 3057-23164		16 EURO PALLETS	2299kg
*** Status "C" ***		16 EURO'S GELOOT	
		16 " " GELADEN	
13 Opmerkingen DELIVERY 30JUN.!	19 Speciale Afzender Overeenkomst	Geldsoort	Ontvanger
	Vrachtprijs		
	Kortingen		
	Saldo		
	Bijeenkomsten		
	Totaal:		
14 Frankeringsvoorschriften / Prescriptions: FRANCO	20 Besondere afspraken		
15 Remboursement	24 Goed Ontvangen / Plaats		
21 Plaats en Datum opmaken Vrachtbrief: Schiphol, 29 JUN 2020	Afzende	Transporter S/E	Date Place
	5.1.2e		
			Signature du Destinaire

