



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Checklist prestatiecontrole adem- en beschermingsmaskers

| | |
|-------------------------------|---|
| LOT-nummer | 2124 |
| Datum uitvoering check | 03-09-2020 |
| Leveringsdatum | |
| Leverancier | |
| Productnaam of naam fabrikant | Guangzhou Kangling Medical Supplies LTD |
| Productiedatum | |
| Besproken met RIVM | |

Advies: FAIL

Type masker bij uitgifte: KN95

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notifiëde bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Technical data sheet aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM | Geen documentatie voorhanden | |

Prestatie levering

| | |
|--------------------------|---|
| Oordeel arbeidshygiënist | Ademt benauwd Lekt bij de neus Elastiek te strak om de oren, Verschuift van de oren. |
|--------------------------|---|

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

| BINNENDOOS/PLASTICZAK | | |
|-----------------------|--|--|
| 1 | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 10 | |
| 2 | Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) | <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: |
| 3 | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? | KN95 protective face mask |
| 4 | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? | Guangzhou Kangling Medical Supplies LTD |
| 5 | Staat een CE merk op de doos/plasticzak? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 6 | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? | <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen |
| 7 | Is er een instructie bijgeleverd? | <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt |
| 8 | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 9 | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 10 | Staat non medical op de binnendoos of zak? | <input type="checkbox"/> Ja, non medical (afkeur voor chirurgisch, aantekening voor FFP/KN95) <input checked="" type="checkbox"/> Nee |

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER | |
|------------------------------------|--|
| 1 | Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| | Zo ja: |
| 2 | Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input checked="" type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3 | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: |

Bijzonderheden:

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

| HET MASKER | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Algemene indruk masker? | <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: | | | | |
| 2 | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: opdruk twezijdig op masker, enkelzijdig op verpakking | | | | |
| 3 | Wat staat er op het masker: | KN95 | | | | |
| | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | <input type="checkbox"/> N.v.t. | | |
| | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee | <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. | | |
| 4 | Is de stof is non woven? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | | <input type="checkbox"/> Nee | | |
| 5 | Aantal lagen van het masker: | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input checked="" type="checkbox"/> 5 |
| 6 | Heeft het masker een nare geur? | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nee | | |
| 7 | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? | <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes | | | | |
| 8 | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? | <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. | | | | |
| 9 | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? | <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los | | | | |
| 10 | Neusstuk | <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> | | | | |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijzonderheden:

| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Hoe past het masker op het gezicht? | <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input checked="" type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/> |
| 2 | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest | <input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch) |
| 3 | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? | <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/> |
| 5 | Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 6 | Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is? | |
| 7 | Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem? | |

| Bij een chirurgisch masker | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Doos | Materiaal neusbeugel | Breedte neusbeugel | Lengte van het uitgeklapte masker |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020

Bijzonderheden:



Rijksoverheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 04-08-2020