

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	28-09-2020
Inkoopnummer	301123
Lotnummer	628
Leverancier	Sungo Europe
Productnaam of naam fabrikant	Zheijang Lanhine
Productiedatum	2020-03-04
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 g58

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	94%	P2
0,5	98%	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	200+	194
Testpersoon 2	46	177
Testpersoon 3	173	62
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM	+		
Oordeel AH/TOXI	+		
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
g58.	<input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	nee	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	628.
Datum uitvoering check	28-4-2020.		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 mask.		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	5.1.2e		
Advies: Type masker bij uitgifte: FFP2.			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	BTE op verpakking is voor. Geen NoBo naast CE op verpakking/masker Geen licentie op masker Ende (16-4-20) heeft licentie certificaten overlegd die vals waren.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	FFP2.
--------------------------	-------

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 20
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? FFP2 mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Zhejiang Lanhine Medical. Products LTD
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) BFE > 99/ <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: CE FFP2 EN 149: 2001 + A1: 2009
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

masker voelt heel dun.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28.04.2020
Inkoopnummer	301123
LOT/X-nummer	628.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	96%	Pass for P ₂	99%	Pass for P ₃
Masker 2	94%	Pass for P ₂	98%	Pass for P ₂
Masker 3	92%	Pass for P ₁	97%	Pass for P ₂
Totaal gemiddelde	94%	Pass for P₂	98%	Pass for P₂

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	73	< 240 Pa	Pass
Masker 2	59		Pass
Masker 3	77.		Pass.

Eindoordeel > 0,3
Voldoet voor P ₂ .
Eindoordeel > 0,5
Voldoet voor P ₂ .

Fittest by RIVM

Datum	28/04/2020
LOT/X-nummer	628

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip
--------------------------------	---	--

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	200+	199
5.1.2e	46	177
5.1.2e	173	62

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	Ruim ruim	ok
Vershuift bij Up & Down/Bending?	beetje beetje	nee ja
Is één clip voldoende?		ja
Extra opmerkingen		

Type FFP Masker	P2
Fit test (FAIL of PASS)	

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 27-04-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 628

Aantal pallets 14

Totaal stuks 126.400

Aantal samples 60

Totaal aantal na samples 126.340

Aantal per pallet 9600

Aantal per doos 800

Aantal per verpakkingseenheid 20

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 950

Inkooporder nummer 301123

LCH-nummer 2020-0012-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: - -

ingeboekt door:

KLM
CARGO

Folder Nbr 4
Trucking Co
Agent BST
Date 27-04-2020
Time 15:28

DELIVERY RECEIPT

Total Pcs	158	Total Weight	897.2 kg	Wooden floors	0	Document nbr.	
AWB nbr.	Manifest nbr.	PCS	Weight	ULD nbr.	Exp.	Add. Doc. Nbr.	Comments
074 3354 0430	08940427	158	897.2			20N LK9I7TOAFKKWD59	

LCH-2020-0012-02

Goods Delivered by

Name 5.1.2e

I hereby declare that I received the goods
in good condition

ACN card nbr 5.1.2h

Name BST(POST NL)
Company BEST GLOBAL LOGISTICS BV
Ident.

license plate
Seal nbr. 02376712

Signature -----

Signature-----

On this delivery the general terms and conditions of the
concerned carrier are applicable.
KLMs "General Conditions of Carriage for Goods" are available
at the KLM-offices.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
KLM Cargo
Postbus 7700, 1117 ZL, Luchthaven Schiphol
KVK Amsterdam nr. 14286