

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	26-4-2020
Inkoopnummer	39769
Lotnummer	473 973
Leverancier	2020-0051-02
Productnaam of naam fabrikant	Migo SMDA
Productiedatum	2020-4
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	94	P2
0,5	99	P3

aanvalactief materiaal
voor spreiding

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	17	16
Testpersoon 2	2	25
Testpersoon 3		
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:	slechte fit! Ook met inzet van clip penetratie op >0,3 ondergrens P2; met opseiding		

Quality Check:	Uitleg indien On Hold:
<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Artikelnummer VWS	
Algemene bevindingen:	veel variatie in particlepenetration test → fit is slecht maskers

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	no	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	473
Datum uitvoering check	20-4-2020		
Leveringsdatum	2020		
Leverancier	Guoxiang - 1 2020-0057-02		
Productnaam of naam fabrikant	Disposable Mask / FFP2 Mask		
Productiedatum	06-04-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM	1.2e		
Advies:			
Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 30
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>voel nasolusredeneel A dus neud gesneden.</i> <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: <i>soms rym ① soms wap ②</i>
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? Particulate respirator FFP2
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Guoxiang / Jiangsu
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>ehin exp?</i> <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <i>voel op de plastic zakie v/d 5 stukke in doos? EN149:2001+ A1:2009 1</i> <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input checked="" type="checkbox"/> Anders:.... <i>FFP2</i> <input type="checkbox"/> Geen <i>deur</i>
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>04-2023</i> <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>Pes s ekeus verpakt</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

↳ labelje vermeldt wel norm

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>geen opdruk op dekening. - ronder wel plekje.</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>CE FFP2 EN149:2001 + A1:2009</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 m wit PP <input checked="" type="checkbox"/> 2 makt bloem vilt <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 makt bloem <input checked="" type="checkbox"/> 5 wit PP
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Datum	20 apr 2020
Inkoopnummer	39769
LOT/X/Z-nummer	473 2 ^e keer.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	91 %	P1	99 %	P3
Masker 2	96 %	P2	100 %	P3
Masker 3	94 %	P2	99 %	P3
Totaal gemiddelde	94 %	P2	99 %	P3

Eindoordeel > 0,3

Voldeet gemiddeld aan de eis van P2

Eindoordeel > 0,5

Voldeet aan de eis van P3

Particle Penetration by Kalibra

Datum	20 apr. 2020
Inkoopnummer	39769
LOT/X/Z-nummer	475

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	57%	Pass P2	95%	Pass P3
Masker 2	97%	Pass P1	90%	Pass P2
Masker 3	92%	Pass P1	99%	Pass P3
Totaal gemiddelde	84%	Pass P2	95%	Pass P3

Eindoordeel > 0,3

Voldoet gen. aan P2

Eindoordeel > 0,5

Voldoet gen. aan P3.

Extra aandacht voor materialen.
Grote spreiding in resultaat.

Fittest by RIVM

Datum	20/4/20
LOT/Z/X-nummer	473

Tester:	Score		
	Zonder clip	Met clip	
5.1.2e	17	16	doos 1
5.1.2e	real time check: 2	21	doos 2
			doos 3

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	beetje ruim bij de kin	ruim bij de kin
Verschuift bij Up & Down/Bending?	ja	ja
Is één clip voldoende?		ja
Overige		Snijdt onder de ogen

Type FFP Masker	P2/P3
FFP2 (Fail of PASS)	PASS FAIL

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

18-04-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

473

Aantal pallets

14

Totaal stuks

200160

Aantal per pallet

14400

Aantal per doos

720

Aantal per verpakkingseenheid

30

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

90

30

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

30769

LCH-nummer

2020-0051-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

ingeboekt door:

Locatie:

KLM
CARGO

Folder Nbr 3
Trucking Co
Agent BST
Date 18-04-2020
Time 15:08

DELIVERY RECEIPT


Total Pcs 380 Total Weight 2640.3 kg Wooden floors 0 Document nbr.

AWB nbr.	Manifest nbr.	PCS	Weight	ULD-nbr.	Exp.	Add. Doc. Nbr.	Comments
074 3354 0161	08960418	278	1869.0	CH 2020-0051-02		BST HULPGOEDEREN	
074 3354 0231	08960418	70	405.0			BST HULPGOEDEREN	
074 3354 0253	08960418	32	366.3			BST HULPGOEDEREN	

18 APR '20 16:31

Goods Delivered by

Name HALL LM

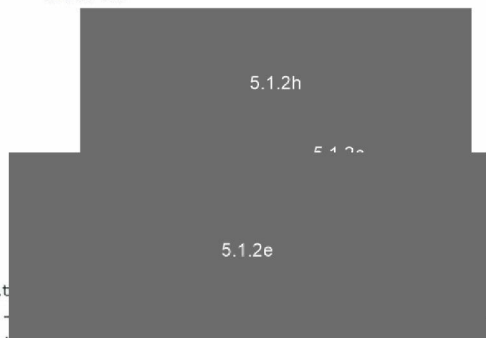

Signature

On this _____ of the _____

concerned carrier are applicable.

KLMS "General Conditions of Carriage for Goods" are available at the KLM-offices.

KLM

I hereby declare that I received the goods in good condition

ACN card nbr 5.1.2h

Name BST HULPGOEDEREN
Company BEST GLOBAL LOGISTICS BV
Ident.

license plate 33-BYP-5
Seal nbr.

Signature 5.1.2e

Koninklijke 5.1.2h V

KLM Cargo
Postbus 7700, 1117 ZL, Luchthaven Schiphol
KVK Amsterdam nr. 14286

KLM
CARGO

Folder Nbr 3
Trucking Co
Agent BST
Date 18-04-2020
Time 15:08

DELIVERY RECEIPT

AWB nbr.	Manifest nbr.	PCS	Weight	ULD nbr.	Exp.	Add. Doc. Nbr.	Comments
074 3354 0161	08960418	278	1869.0			BST HULPGOEDEREN	
074 3354 0231	08960418	70	405.0			BST HULPGOEDEREN	
074 3354 0253	08960418	32	366.3			BST HULPGOEDEREN	

18 APR'20 16:31

Goods Delivered by

Name HALL LM

5.1.2h
5.1.2e

Sig

On

concerned carrier are applicable.

KLMS "General Conditions of Carriage for Goods" are available at the KLM-offices.

KLM

I hereby declare that I received the goods in good condition

ACN card nbr 5.1.2h

Name BST HULPGOEDEREN
Company BEST GLOBAL LOGISTICS BV
Ident.

license plate 33-BYP-5
Seal nbr.

Signature 5.1.2e

Koninklijk KLM Cargo NV
Postbus 7700, 1117 ZL, Luchthaven Schiphol
KVK Amsterdam nr. 14286