


Subject:	Gebruiksaanwijzing	
Document:	AFPRO Filters_TC-2-B1_FFP2_Leaflet_NL_COVID-19	
Revision:	1	
Revision date:	11-06-2020	
Revision by:	5.1.2e	

AFPRO Filters B.V., Berenkoog 67, 1822BN Alkmaar

AFPRO Filters, www.afprofilters.com, Postbus 482, 1800 AL, Alkmaar

Attentie:

Dit filterende halfgelaatsmasker is uitsluitend gemaakt voor bescherming tegen COVID-19. Dit filterende halfgelaatsmasker is geen Persoonlijk Beschermings Middel voor algemeen gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan bescherming tegen COVID-19. (EU_2020_403)

Gebruik


Dit FFP2 gelaatsmasker is bedoeld als ademlucht filter voor het gebruik tegen het inademen van partikels en virussen in de lucht.

Dit gelaatsmasker is ontworpen voor eenmalig gebruik, gedurende 1 shift (single shift).

Gebruiksaanwijzing

- Pak het mondmasker op ontvouw deze, door de aluminium strip bij de neus helemaal horizontaal te buigen.
- Buig vervolgens vergelijkbaar aan de vorm van uw neus
- Pak het masker met een hand op en plaats het op de juiste positie op uw gezicht – de aluminium strip aan de bovenkant (neus).
- Pak met uw andere hand het onderste elastiek en zet het over uw hoofd heen, tot het in de nek rust
- Pak het bovenste elastiek beet – vlak voor het masker - en zet dit op het achterhoofd
- Pak het masker met beide handen aan de voorzijde beet en positioneer het neusgedeelte op de neus. Let hierbij op dat het onderste gedeelte van het masker zich nog steeds onder de kin bevindt.
- Wanneer het masker op de juiste positie zit, drukt u met beide handen – met wijsvinger en middelvinger – op de top van uw neus waar zich het aluminium stripje bevindt.
- Herhaal dit een aantal maal, terwijl u aan beide zijden van de neus steeds lager gaat.
- Herhaal deze stap totdat het aluminium stripje volledig langs de neus geplooid is
- Haal diep en adem en controleer of er geen lekkage optreedt
- Indien er lekkage optreedt op of rond de neus, herhaal de stappen hierboven, totdat de afsluiting goed is.
- U bent nu beschermd volgens FFP2 standaard.



Subject:	Gebruiksaanwijzing	
Document:	AFPRO Filters_TC-2-B1_FFP2_Leaflet_NL_COVID-19	
Revision:	1	
Revision date:	11-06-2020	
Revision by:	5.1.2e	

AFPRO Filters B.V., Berenkoog 67, 1822BN Alkmaar

! Waarschuwingen en beperkingen

- Gebruik dit masker uitsluitend waar het voor bedoeld is;
- Zorg dat dit masker goed aansluit op het gezicht (zie gebruiksaanwijzing);
- Gebruik dit masker alleen in omgevingen waarvoor deze bedoeld is: Indien de verontreiniging en/of concentraties in de lucht onbekend zijn, staak de werkzaamheden en verlaat de omgeving;
- Draag dit masker voortdurend tijdens de blootstelling;
- Gebruik dit product alleen in z'n geheel;
- Laat geen elastische lussen loshangen, om het risico gegrepen te worden bij werk met draaiende machines/ delen te voorkomen;
- Gebruik dit masker gedurende maximaal 1 shift en gooi het na gebruik in de afvalbak;
- Vervang dit gelaatsmasker onmiddellijk wanneer de ademweerstand te hoog wordt;
- Gebruik dit masker niet op een nat gezicht;
- Let op de uiterste gebruiksdatum \times yy/mm op het masker. Bij gebruik buiten de uiterste gebruiksdatum kan de werking van dit gelaatsmasker zijn verminderd;
- Dit masker is niet bedoeld voor het filteren van vloeistoffen, geur, gassen en vluchtige dampen;
- Uitsluitend voor gebruik zonder baard: Met een baard kan de optimale werking van dit masker niet worden gegarandeerd;
- Indien nodig, vervang dit masker;
- Gebruik dit masker niet wanneer het zuurstofgehalte in de lucht beneden 19,5% is gedaald;
- Gebruik dit masker uitsluitend bij een relatieve vochtigheid onder 80%;
- Gebruik dit masker uitsluitend bij een temperatuur tussen -20°C en +40°C;
- Niet in de buurt van open vuur gebruiken;
- Niet ontworpen voor gebruik in explosieve omgevingen;
- Volg lokale veiligheidsinstructies op;
- Dit gelaatsmasker niet veranderen, reinigen of repareren;
- Bij het niet- of niet volledig dragen van dit gelaatsmasker tijdens blootstelling, kan ernstige schade voor de gezondheid optreden;

Bewaren en Transport

Bewaar dit product op een schone- en droge plaats. Houd weg uit direct zonlicht. Bewaar dit product bij voorkeur in de originele verpakking. Bewaar deze bijsluiter.

Voor opslag, volg de aanwijzing op de verpakking.

Na gebruik als afval verwerken volgens de lokale voorschriften. Voor Nederland valt dit gelaatsmasker onder de categorie restafval.

Samenstelling en allergieën

Dit gelaatsmasker bevat geen natuurrubber. Voor zover bekend wekken de gebruikte materialen geen allergieën op. Mocht dit gelaatsmasker desondanks voor irritatie zorgen, staak dan direct het gebruik.

Dit gelaatsmasker is een FFP2 gelaatsmasker en valt onder categorie III persoonlijk beschermingsmiddel. Dit gelaatsmasker voldoet aan de eisen van Technical Specification: BSI's PPE for Healthcare Professionals 2020/403 – Respiratory Protective Equipment. Tevens voldoet dit gelaatsmasker aan de eisen van de richtlijn PPE Regulation (EU) 2016/425. NB 2797 - BSI Group The Netherlands B.V., John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands.

Zie voor de conformiteitsverklaring op zie <https://www.afprofilters.com/product/disposable-masks/TC-2-B1/DeclarationOfConformity/>