

JOUW TESTKIT BEVAT DE VOLGENDE ARTIKELEN:


Activeer eerst jouw testkit op [homediq.com/activeer](https://www.homediq.com/activeer)

Jouw test wordt alleen verwerkt indien deze is geactiveerd via onze website

HOF NEEM JE EEN CORONA PCR TEST AF?

STAP 1 ACTIEVEER UW TESTKIT	 1 BELANGRIJK: Activeer deze testkit op www.homediq.com/activeer anders kan het laboratorium dit testmonster niet verwerken.	 2 Gebruik de 'Unieke Testkit ID code' welke vermeld staat op de binnenkant van het doosje. Controleer twee of de code op het doosje overeen komt met de code op de testbuis.	 3 Vul je geboortedatum, geslacht en de afnamedatum in aan de binnenkant van het doosje.
STAP 2 VOOR BEERENDE	 1 Snuit voorzichtig je neus en hoest enkele keren in een tissue zodat overtollig slijm de test niet verstoort. Was vervolgens je handen met warm water gedurende 30 seconden en droog deze daarna af.	 2 Haal de wattenstaaf uit de verpakking. Raak het witte puntje van de wattenstaaf niet aan. Als je zelf de test afneemt raden wij aan dit voor de spiegel te doen. Indien iemand anders helpt bij de afname, raden wij aan om een zaklamp te gebruiken om extra licht te schijnen en lichter in de keel.	 3 Houd de wattenstaaf vast met duim en wijsvinger en open de mond wijd. Wijf met de punt van de wattenstaaf voor gedurende 10 seconden achter in de keel over beide amandelen (of de plek waar deze hebben gezeten). Haal vervolgens de wattenstaaf weer uit de mond.
STAP 3 COLLECTIE	 1 Gebruik dezelfde wattenstaaf en steek deze ongeveer 2 tot 4 cm in je neusgat. Draai de wattenstaaf voor 10 tot 15 seconden langs de randen aan de binnenkant van de neus. Herhaal vervolgens bovenstaande stappen voor het andere neusgat.	 2 Plaats het wattenstaafje met het witte puntje eerst in de buis met vloeistof en zorg ervoor dat de vloeistof in de testbuis er niet uit loopt.	 3 Breek voorzichtig het stokje van het wattenstaafje af op de breekrand. Draai vervolgens de dop op de testbuis met het wattenstaafje erin.
STAP 4 VERPAKKING VERZEGELEN	 1 Plaats de afgesloten testbuis in het meegeleverde plastic beschermzakje en sluit deze met behulp van de plastic plakrand.	 2 Plaats vervolgens het beschermzakje in de doos en sluit deze af.	 3 Stop de doos in de meegeleverde retourenvelop en verzend deze direct naar het adres vermeld op de retourenvelop. De kosten van de retourzending zijn reeds voldaan.

- Zorg ervoor dat je de test online activeert op www.homediq.com/activeer. Als je de testkit niet hebt geactiveerd kan het laboratorium jouw testgegevens helaas niet verwerken.
- Zorg dat je de stapsgewijze instructies in de handleiding volgt.
- Plaats de afgesloten buis in het meegeleverde plastic zakje en sluit het zakje met behulp van de plastic plakrand. Plaats deze vervolgens in de doos en retourneer per retourenvelop naar het laboratorium.
- Zodra je het testmateriaal heeft afgenomen, dien je de testkit onmiddellijk op te sturen naar het adres op de retourenvelop, indien de buitentemperatuur boven de 25°C is, verzenden wij je het pakketje af te geven bij een *PostNL afhaalpunt*.

VOLGENDE STAP?

Jouw testresultaten worden beoordeeld door ons medisch team.

Zodra het laboratorium jouw testmonster heeft ontvangen zullen ze deze verwerken.

We nemen onmiddellijk contact met je op zodra uw testresultaten gereed zijn.

VRAAGEN?

- homediq.com/nl/faq
- [072 012 34 56](tel:+31720123456) [homediq.com](https://www.homediq.com)

