
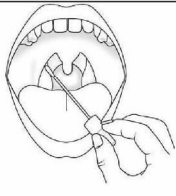
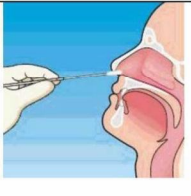
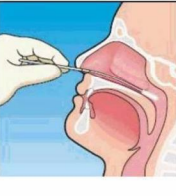







Afname instructie Aptima buis

Zelfafname respiratoire onderzoek (coronavirus); Aptima buis

1	2a	2b	
 <p>k</p>			
<p>In de verpakking zit één Aptima buis (oranje) met één wattenstaafje.</p> <p>Haal het buisje met vloeistof en het wattenstaafje uit de verpakking.</p>	<p>Strijk het wattenstaafje eerst één keer langs de linker gehemelteboog / keelamandelen (naast de huig) en één keer langs de rechterboog.</p>	<p>Daarna (met hetzelfde wattenstaafje), breng het wattenstaafje door één neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (\pm 1/2 to 2/3)</p>	<p>Trek met een roterende beweging het wattenstaafje terug.</p> <p>NB. tranen/hoesten bij dit onderzoek is normaal. Enkele malen slikken voorkomt hoesten.</p>
3	4		
			
<p>Steek elk wattenstaafje in verschillende Aptima buizen na het maken van de uitstrijken tot op de bodem van de buis. Breek het kweekstokjes bij het rode streepje af.</p>	<p>Draai de dop goed op de buis.</p>	<p>Zorg dat uw naam, geslacht en geboortedatum op het buisje komen (sticker/stift).</p>	

NB.

- De vloeistof blijft in de buis
- Was bij spatten de huid met water en zeep
- Spoel bij spatten in het oog met heel veel water