
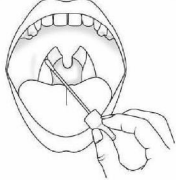
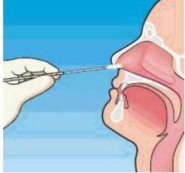
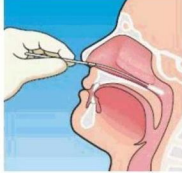







## Afname instructie e-Swab

### Zelfafname respiratoire onderzoek (coronavirus); e-Swab

1	2a	2b	
			
<p>In de verpakking zit <b>één</b> e-Swab (roze dop) met <b>één</b> wattenstaafje.</p> <p>Haal het buisje met vloeistof en het wattenstaafje uit de verpakking.</p>	<p>Strijk het wattenstaafje <b>eerst één keer</b> langs de linker gehemelteboog / keelamandelen (naast de huig) en één keer langs de rechterboog.</p>	<p><b>Daarna</b> (met <b>hetzelfde</b> wattenstaafje), breng het wattenstaafje door <b>één</b> neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (± 1/2 to 2/3)</p>	
3		4	
			
<p>Steek de wattenstaafje na het maken van de uitstrijken tot op de bodem van de buis. Breek het kweekstokjes bij het rode streepje af.</p>	<p>Draai de dop goed op de buis.</p>	<p>Zorg dat uw naam, geslacht en geboortedatum op het buisje komen (sticker/stift).</p>	

#### NB.

- De vloeistof blijft in de buis
- Was bij spatten de huid met water en zeep
- Spoel bij spatten in het oog met heel veel water