


PROCEDURE AFNAME COVID-19 SNELTEST SARDT

De testkit bevat de volgende materialen:

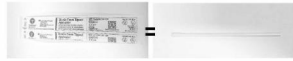

Stok verpakt



Reagens




Sneltest verpakt



1

Lees de volledige testprocedure voordat je begint.

De test kit bevat een kweekstok voor de afname van keel- en neusuitstrijk.

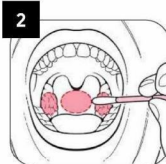

2

Strijk de kweekstok langs de tonsillen en geheel achterin de keel. Er kan een kokhals reflex optreden. Haal de kweekstok NIET langs de wangen of de tong.



3

Gebruik dezelfde kweekstok als die voor de keel is gebruikt.



4

Introduceer de kweekstok in een willekeurig neusgat tot 2.5 cm diep vanaf de ingang gemeten en draai de stok 5 keer rond.




5


HERHAAL DEZE PROCEDURE voor het tweede neusgat.

Ga verder op achterzijde.



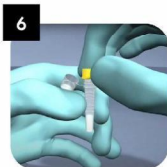

Verwijder de gele dop van de reagent buis.

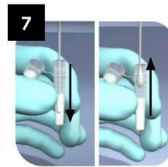


Breng de strijktok en dompel deze deze op en neer in de vloeistof voor 15 seconden.



Druk de dispenser dop op de tube. Meng de sample door tegen de tube te tikken of meng de vloeistof door de onderkant rustig rond te draaien.



Breng 3 druppels van het ontwikkelde sample aan op de 'sample well'.

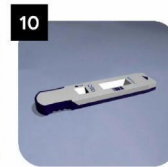

Wacht 15 minuten.

Na 15 minuten zal de uitslag van de test leesbaar zijn op het venster van de sneltest.



Begin op voorzijde.

DO'S EN DON'TS

Dit is wat je wel/niet doet

SNELTEST NEGATIEF

Dit is wat je doet

SNELTEST POSITIEF

Dit is wat je doet